

# 子機・コンセント

## ハンド型子機



抗菌仕様

ハンド型子機  
NL-SB (税別)  
¥12,500 (税別)  
●コード長 約1.5m

## 呼出握りボタン



抗菌仕様

呼出握りボタン  
NLR-8 (税別)  
¥4,000 (税別)  
●コード長 約1.5m



抗菌仕様

呼出握りボタン  
NLR-8-TT (税別)  
¥4,800 (税別)  
●点滴・トイレ介助ボタン付  
●コード長 約1.5m

呼出握りボタン

| 品番        | 価格(税別)  | コード長 | 点滴・トイレ介助ボタン | 納期       |
|-----------|---------|------|-------------|----------|
| NLR-8     | ¥4,000  | 1.5m | —           | ●(税別)30日 |
| NLR-8-0.3 | ¥10,500 | 30cm | —           | ●(税別)30日 |
| NLR-8-TT  | ¥4,800  | 1.5m | ○           | ●(税別)30日 |

●「点滴終了」や「トイレ介助」の用件を口に出して話さなくても親機に知らせます。

## コンセント



コンセント  
NLR-C2 (税別)  
¥15,500 (税別)  
●復旧ボタン付  
プレートは別途※1



コンセント  
(緊急呼出ボタン付)  
NLR-CS2 (税別)  
¥16,500 (税別)  
●復旧ボタン付  
プレートは別途※2

## 子機




子機 (コンセント付)  
NL-C2 (税別)  
¥16,800 (税別)  
●復旧ボタン付  
プレートは別途※2



子機 (コンセント・緊急呼出ボタン付)  
NL-CS2 (税別)  
¥22,000 (税別)  
●復旧ボタン付  
プレートは別途※3

### 呼出握りボタン用大型ボタン (NLR-BC) の取扱方法

呼出握りボタン用大型ボタン(NLR-BC)は、呼出握りボタン(NLR-8、NLR-8-TTなど)をセットし、使用します。

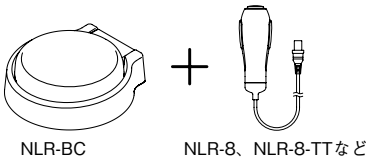


**ご注意**  
※呼出握りボタン(点滴・トイレ介助ボタン付)を使用する場合は、点滴・トイレ介助ボタンは使えません。  
※フタとケースの間にゴミ等が入ると、ボタンが押せなくなり、呼出しができなくなることがあります。  
※機器を取り付けた後は、必ず呼出し確認を行ってください。

#### 取付方法


##### 1.フタをケースから取りはずす

- ①ケース裏側の穴に指を入れ、しっかりとケースを支えのままフタを押し上げます。
- ②フタをケースに対して垂直になるよう、立てます。
- ③フタをスライドして取りはずします。

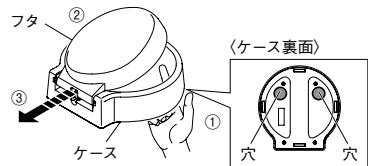


##### 2.呼出握りボタンをケースに取り付ける

- ①呼出握りボタンの先端を図のように差し込みます。(呼出ボタン(握り部分)が上下になるように入れます。)
- ②呼出握りボタンのコード側をガイド部にはめ込みます。
- ③コードが溝に納まったことを確認してください。

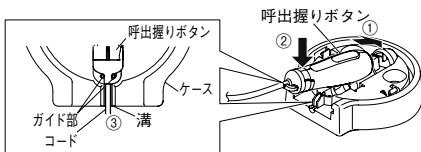


##### 3.フタをケースに取り付ける

ケースの溝にフタの突起部をはめ込みます。

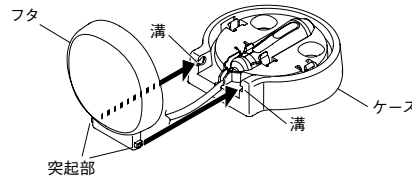


##### 4.ケースを閉める

フタの突起部が溝にしっかりと納まったことを確認し、ゆっくりとフタを閉め、「カチッ」と鳴るまで押してください。閉めた後、必ず動作確認を行ってください。

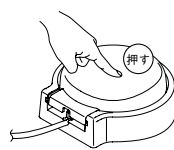

**ご注意**  
※フタの突起部が溝にしっかりと納まっていないままフタを閉めると、フタまたはケースが破損する恐れがあります。  
※握りボタンが接続されたままフタを閉めると、呼出ボタンが押され、呼出しがかかることがあります。

### ■取付図(mm)

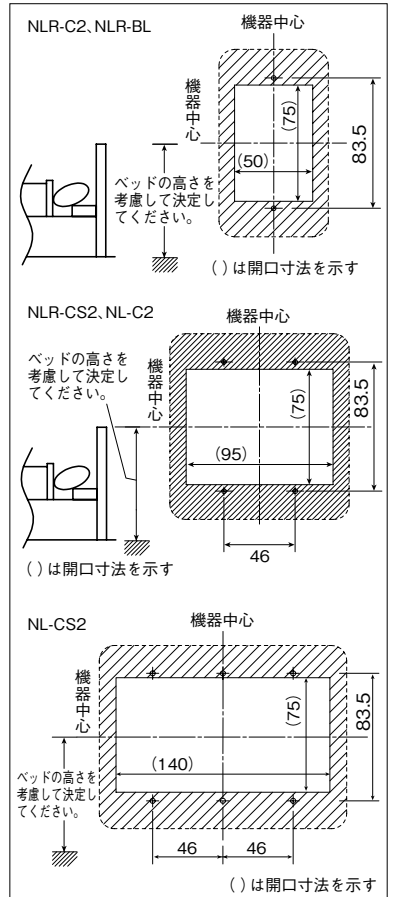

写真のプレートは、パナソニック株製 ※1: WTF7003W(商品)、※2: WTF7006W(商品)、※3: WTF7009W(商品)