

NFX-LAN 呼出動作

基本操作方法

呼出優先度 (高)	呼び出す	呼出を受ける		廊下表示		対応	復旧
		親機	ハンディナース	集合廊下灯	アダプター方式		
緊急呼出	生体情報モタ※1 	 心内 SpO2 303-1 有村 俊秀 101	 有村俊秀 SpO2 303-1	—		 通報元を確認し、現場へかけつけます	通話することで復旧します。 ※生体情報モタのアラームは復旧しません。
	スタッフコール 	 心内 スタッフコール 303-1 有村 俊秀 101	 有村俊秀 SC 303-1	 早い赤色点滅 / 点滅 早い赤色点滅		 通報元を確認し、現場へかけつけます	 復旧ボタンを押す(現場復旧)
	ペンダントコール 	 ペンダントコール 303-1 101	 有村俊秀 PC 303-1	 早い赤色点滅		 通報元を確認し、現場へかけつけます	 復旧ボタンを押す(現場復旧)
	徘徊 受信機が発信機の接近をキャッチ・通報	 徘徊 303-1 101	 有村俊秀 HK 303-1	 早い赤色点滅		 通報元を確認し、現場へかけつけます	 復旧ボタンを押す(現場復旧)
	オプションA※2 センサーが緊急異常を感知	 心内 オプションA 303-1 有村 俊秀 101	 有村俊秀 QA 303-1	 早い赤色点滅 / 点滅 早い赤色点滅		 通報元を確認し、現場へかけつけます	 通話終了もしくは復旧ボタンを押す
	トイレコール 	 トイレコール 320-1 101	 有村俊秀 TC 320-1	 遅い赤色点滅 / 点滅 遅い赤色点滅		 通報元を確認し、現場へかけつけます	 通話終了もしくは復旧ボタンを押す
一般呼出	バスコール 	 バスコール 321-1 101	 有村俊秀 BC 321-1	 遅い赤色点滅 / 点滅 遅い赤色点滅		 通報元を確認し、現場へかけつけます	 通話終了もしくは復旧ボタンを押す
	オプションB※2 センサーが異常を感知	 心内 オプションB 305-1 有村 俊秀 101	 有村俊秀 OB 305-1	 早い橙色点滅 / 点灯 早い橙色点滅		 通報元を確認し、現場へかけつけます	 通話終了もしくは復旧ボタンを押す

※1:制御装置と接続した場合。 ※2:設定により優先度を変更することができます。