

| 呼出優先度<br>(高)         | 呼び出す                           | 呼出を受ける |         |                       | 対応                        | 復旧                            |
|----------------------|--------------------------------|--------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                      |                                | 親機     | ハンディナース | 廊下表示<br>集合廊下灯 アダプター方式 |                           |                               |
| 一般呼出                 | コール<br>                        |        |         |                       |                           | <br>通話終了もしくは<br>は復旧ボタンを<br>押す |
|                      | ナースコール<br>                     |        |         |                       |                           | <br>通話終了もしくは<br>は復旧ボタンを<br>押す |
|                      | 点滴呼出<br><br>点滴ボタン<br>を押す       |        |         |                       | 呼出元を<br>確認し、<br>対応<br>します | <br>通話終了もしくは<br>は復旧ボタンを<br>押す |
|                      | トイレ介助呼出<br><br>トイレ介助<br>ボタンを押す |        |         |                       | 呼出元を<br>確認し、<br>対応<br>します | <br>通話終了もしくは<br>は復旧ボタンを<br>押す |
|                      | ドアホン呼出<br><br>玄関子機の<br>呼出ボタン   |        |         | —                     |                           | <br>通話終了                      |
| 解錠呼出                 | 電気錠の<br>解錠<br>                 |        |         | —                     |                           | <br>通話終了                      |
|                      | 脱落断線<br>約20秒後<br><br>警報        |        |         |                       | 呼出元を<br>確認し、<br>対応<br>します | <br>脱落・断線<br>を直します            |
| 脱落断線<br>呼出優先度<br>(低) |                                |        |         |                       |                           |                               |