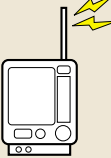
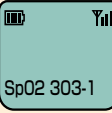


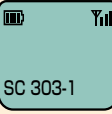
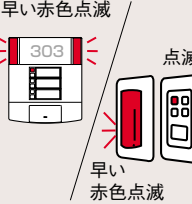

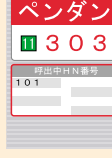
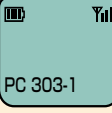



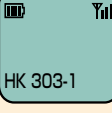



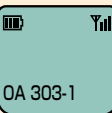
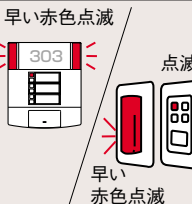


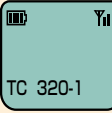
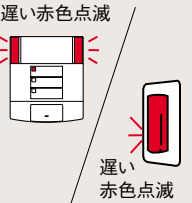

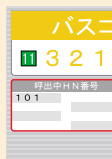
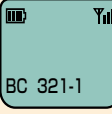
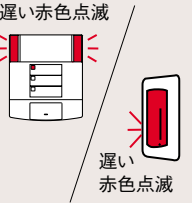


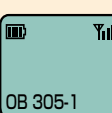




NFX 呼出動作

■基本操作方法 ※呼出の優先順位が高い順に記載しています

呼出優先度 (高)	呼び出す	呼出を受ける		廊下表示		対応	復旧
		親機	ハンディナース	集合廊下灯	アダプター方式		
緊急呼出	生体情報モータ ※1			—			通話をすることで復旧します。 ※生体情報モニタのアラームは復旧しません。
	スタッフコール						復旧ボタンを押す(現場復旧)
	ペンダントコール						復旧ボタンを押す(現場復旧)
	徘徊						復旧ボタンを押す(現場復旧)
	オプションA ※2						通話終了もしくは復旧ボタンを押す
	トイレコール						通話終了もしくは復旧ボタンを押す
一般呼出	バスコール						通話終了もしくは復旧ボタンを押す
	オプションB ※2						通話終了もしくは復旧ボタンを押す

※1:制御装置と接続した場合。 ※2:設定により優先度を変更することができます。