

同時通話ナースコールNBE・NBM-HP

ハンディナーズシステム


→P.444 参照



スタッフステーション

ナースコール親機

ボード型

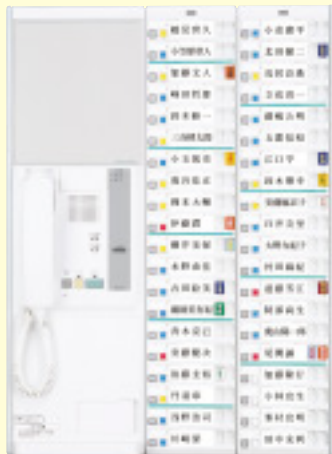

卓上型



20局用卓上型親機
NBM-20B/A-HP
¥364,000(税別)

40局用ボード型親機
NBE-40MB/A(※20局)
¥963,000(税別)

■NBM-HP価格一覧

品番	局数	価格(税別)	納期
NBM-20B/A-HP	20局	¥364,000	
NBM-40B/A-HP	40局	¥471,000	
NBM-60B/A-HP	60局	¥781,000	オーダー
NBM-80B/A-HP	80局	¥963,000	オーダー
NBM-100B/A-HP	100局	¥1,166,000	オーダー

■NBE価格一覧

品番	局数	価格(税別)	納期
NBE-20MB/A	20局	¥802,500	※20局
NBE-40MB/A	40局	¥963,000	※20局
NBE-60MB/A	60局	¥1,124,000	※20局
NBE-80MB/A	80局	¥1,284,000	※20局
NBE-100MB/A	100局	¥1,445,000	※20局

●壁掛で使用する場合

取付補助板

20局用	40局用
*NBM-20B/A-HP用 NBR-20K	*NBM-40B/A-HP用 NBR-40K

※60局以上を壁掛で使用する場合は
弊社担当者までご相談下さい。


4

ハンディナーズ対応個別線式ナースコール

特長

ベッド単位呼出・ベッド単位通話

ベッド単位で患者さんからの呼出を表示し、ベッド単位でお話できます。

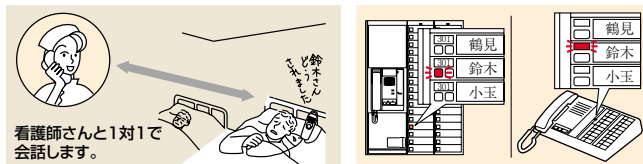

看護師さんと1対1で会話をします。

ハンディナーズシステムと接続可能

ハンディナーズでは、移動中やベッドサイドにいても、患者さんからの呼出にその場で応答できます。

スタッフステーション以外からでも患者さんへの一斉放送や、呼出・通話ができます。また、看護師さんどうしの連絡ができます。

PS切替機能

夜間など看護師さんの人手が少ないときは、患者さんからの呼出を別フロアのハンディナーズで受けることができます(PS切替)。

操作方法

	呼出操作	廊下	ハンディナーズ	スタッフステーション	操作
通常の呼出	 呼出握りボタンを押します。	 赤色点灯で知らせます。	 どこからの呼出が表示されます。	 呼出音はメロディ音とチャイム音の2種類です。該当する患者さんの表示灯が点灯します。	 看護師さんと通話します。
トイレ呼出	 トイレ呼出ボタンを押します。	 赤色点灯で知らせます。	 どこからの呼出が表示されます。	 呼出音はメロディ音とチャイム音の2種類です。	 呼出元を確認し、現場へかけつけます。