

同時通話ナースコールNBE-SJ

ルーム
単位通話

ベッド単位
呼出表示

ハンディナーズシステム

→P.444 参照



スタッフステーション

ナースコール親機

ボード型



40局用ボード型親機
NBE-40MB/A-SJ (税別) ¥1,017,000 (税別)

■NBE-SJ価格一覧

品番	局数	価格(税別)	納期
NBE-20MB/A-SJ	20局	¥856,000	約30日
NBE-40MB/A-SJ	40局	¥1,017,000	約30日
NBE-60MB/A-SJ	60局	¥1,177,000	約30日
NBE-80MB/A-SJ	80局	¥1,338,000	約30日
NBE-100MB/A-SJ	100局	¥1,498,000	約30日



4

ハンディナーズ対応個別線式ナースコール

特長

ベッド単位呼出・ルーム単位通話

ベッド単位で患者さんからの呼出を表示し、ルーム単位でお話できます。

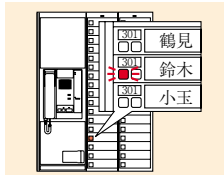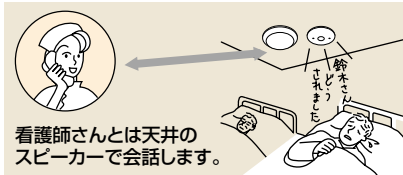

ハンディナーズシステムと接続可能

ハンディナーズでは、移動中やベッドサイドにいても、患者さんからの呼出にその場で応答できます。

スタッフステーション以外からでも患者さんへの一斉放送や、呼出・通話ができます。また、看護師さんどうしの連絡ができます。

PS切替機能

夜間など看護師さんの人手が少ないときは、患者さんからの呼出を別フロアのハンディナーズで受けることができます(PS切替)。

■操作方法

	呼出操作	廊下	ハンディナーズ	スタッフステーション	操作
通常の呼出	 呼出握りボタンを押します。	 赤色点灯で知らせます。	 どこからの呼出が表示されます。	 呼出音はメロディ音とチャイム音の2種類です。該当する患者さんの表示灯が点灯します。	 看護師さんと通話します。
トイレ呼出	 トイレ呼出ボタンを押します。	 赤色点灯で知らせます。	 どこからの呼出が表示されます。	 呼出音はメロディ音とチャイム音の2種類です。	 呼出元を確認し、現場へかけつけます。