

# 同時通話ナースコール NBE-J・NBM-HP

**ルーム**  
単位通話

**ルーム単位**  
呼出表示

## ハンディナースシステム

→P.444 参照



## スタッフステーション

### ナースコール親機

ボード型



卓上型



20局用卓上型親機  
NBM-20B/A-HP  
¥364,000 (税別)

40局用ボード型親機  
NBE-40MB/A-J (※30B)  
¥1,017,000 (税別)

### ■NBM-HP価格一覧

品番	局数	価格(税別)	納期
NBM-20B/A-HP	20局	¥364,000	
NBM-40B/A-HP	40局	¥471,000	
NBM-60B/A-HP	60局	¥781,000	オーダー
NBM-80B/A-HP	80局	¥963,000	オーダー
NBM-100B/A-HP	100局	¥1,166,000	オーダー

### ■NBE-J価格一覧

品番	局数	価格(税別)	納期
NBE-20MB/A-J	20局	¥856,000	※30B
NBE-40MB/A-J	40局	¥1,017,000	※30B
NBE-60MB/A-J	60局	¥1,177,000	※30B
NBE-80MB/A-J	80局	¥1,338,000	※30B
NBE-100MB/A-J	100局	¥1,498,000	※30B

●壁掛で使用する場合

### 取付補助板

20局用	40局用
*NBM-20B/A-HP用 NBR-20K	*NBM-40B/A-HP用 NBR-40K

※60局以上を壁掛で使用する場合は  
弊社担当者までご相談下さい。


4

ハンディナース対応個別線式ナースコール

## 特長

### ルーム単位呼出・ルーム単位通話

ルーム単位で患者さんからの呼出を表示し、ルーム単位でお話しできます。

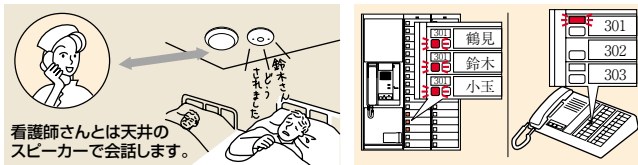

看護師さんとは天井のスピーカーで会話をします。

※ボード型親機は該当する病室の全ての患者さんの表示灯が点灯します。

### ハンディナースシステムと接続可能

ハンディナースでは、移動中やベッドサイドにいても、患者さんからの呼出にその場で応答できます。

スタッフステーション以外からでも患者さんへの一斉放送や、呼出・通話ができます。また、看護師さんどうしの連絡ができます。

### PS切替機能

夜間など看護師さんの人手が少ないときは、患者さんからの呼出を別フロアのハンディナースで受けることができます(PS切替)。

## 操作方法

	呼出操作	廊下	ハンディナース	スタッフステーション	操作
通常の呼出	 呼出握りボタンを押します。	 赤色点灯で知らせます。	 どこからの呼出が表示されます。	 呼出音はメロディ音とチャイム音の2種類です。該当病室のすべての表示灯が点灯します。	 看護師さんと通話します。
トイレ呼出	 トイレ呼出ボタンを押します。	 赤色点灯で知らせます。	 どこからの呼出が表示されます。	 呼出音はメロディ音とチャイム音の2種類です。	 呼出元を確認し、現場へかけつけます。