

1 ナースコールシステム  
ご選択にあたって

2 V i i r n u r s e

3 N F X システム

4 ハンディナース  
対応個別線式  
ナースコール

5 ハンディナース  
システム

6 連絡システム

7 ナースコール  
Renovest

8 F A G U S

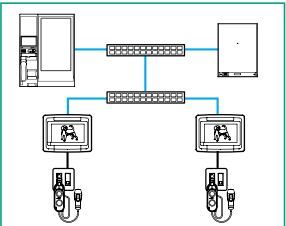
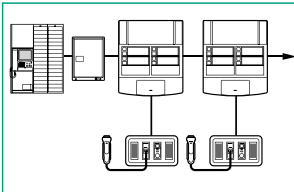
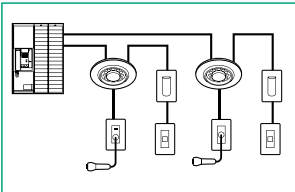
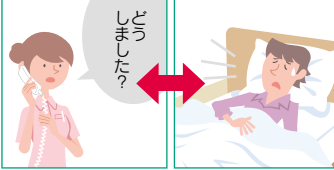
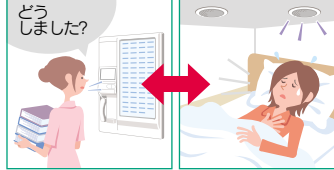
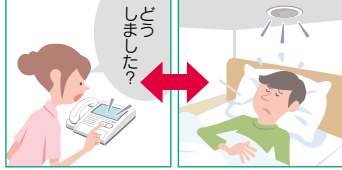
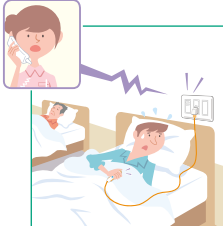
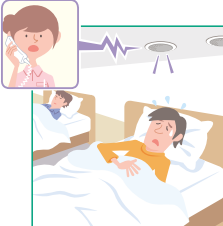
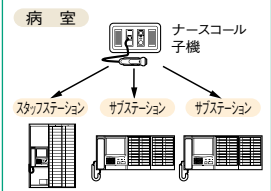
9 緊急通報装置

10 地域包括  
ケアシステム業務  
支援ソフトウェア

11 保守メンテナンス  
について

# 用語説明

## システムに関する用語

用語	内 容																									
配線方式	<p>● <b>IPネットワーク</b></p> <p>IPネットワーク (LAN配線) で親機、制御装置、各病室を接続します。</p> 	<p>● <b>共通線式</b></p> <p>制御装置から共通の配線で各病室を接続します。</p> 	<p>● <b>個別線式</b></p> <p>ナースコール親機から各病室へそれぞれ配線します。</p> 																							
	<p>● <b>同時通話</b></p> <p>看護師さんと患者さんの双方が同時に通話できます。</p> 	<p>● <b>ハンズフリー通話 (自動交互通話)</b></p> <p>看護師さんが話すと送話状態になり、話すのを止めると受話状態になります。(自動切替)</p> 	<p>● <b>交互通話</b></p> <p>通話ボタンを押すと送話状態に、離すと受話状態になります。</p> 																							
局数	<p><b>ベッド単位方式の場合</b> ベッド数+トイレ・浴室数=局数</p> <p>【局数例】 ※この例では10局必要になります。</p> <table border="1" data-bbox="311 1243 821 1344"> <tr> <td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>男子 トイレ</td><td>女子 トイレ</td> </tr> <tr> <td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> </table>	1	3	5	7	男子 トイレ	女子 トイレ	2	4	6	8	9	10	<p><b>ルーム単位方式の場合</b> 病室数+トイレ・浴室数=局数</p> <p>【局数例】 ※この例では4局必要になります。</p> <table border="1" data-bbox="917 1243 1428 1344"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>男子 トイレ</td><td>女子 トイレ</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>4</td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	男子 トイレ	女子 トイレ				4			
	1	3	5	7	男子 トイレ	女子 トイレ																				
2	4	6	8	9	10																					
1	2	3	男子 トイレ	女子 トイレ																						
			4																							
通話単位	<p>● <b>ベッド単位通話</b></p> <p>ベッドサイドのスピーカーとマイクで患者さんと1対1で通話できます。</p> 	<p>● <b>ルーム単位通話</b></p> <p>天井のスピーカーとマイクで患者さんと病室 (居室) 単位で通話できます。</p> 																								
	<p>● <b>ベッド単位呼出</b></p> <p>患者さんからの呼出を、ベッド単位で受けられます。どのベッドからの呼出かがわかります。</p>	<p>● <b>ルーム単位呼出</b></p> <p>患者さんからの呼出を、ルーム単位で受けられます。どの病室からの呼出かがわかります。</p>																								
呼出方式	<p>● <b>同時呼出システム</b></p> <p>病室からの呼出を複数の場所で同時に受けることができます。2台以上の親機が同一看護エリアに設置されている場合、一方の親機の呼出を遅らせることができます。</p> 	<p>● <b>呼出切替システム (集中管理)</b></p> <p>病室からの呼出を状況に応じて切り替えることができます。夜間は特定のスタッフステーションに呼出を集中させることができます。</p> 