

1 ナースコールシステム
ご選択にあたって

2 Vi-nurse

3 NFXシステム

4 ハンディナース対応個別線式ナースコール

5 ハンディナースシステム

6 連絡システム

7 ナースコール Renovest

8 FAGUS

9 緊急通報装置

10 地域包括ケアシステム業務支援ソフトウェア

11 保守メンテナンスについて

呼出優先度 (高)	呼び出す	呼出を受ける			対応	復旧
		親機 PC親機(呼出ポップアップ表示)	親機(操作画面)	ハンディナース (IOS-301JR)		
脱落断線	脱落断線 約20秒後				早い橙色点滅 早い橙色点滅	呼出元を確認し、対応します
			♪プープー(連続鳴動)	♪ビービー... (着信ランプ:紫色)		
脱落停止	脱落断線警報停止スイッチを 戻し忘れた				早い橙色点滅 早い橙色点滅	呼出元を確認し、対応します
			♪プープー(連続鳴動)	♪ビービー... (着信ランプ:紫色)		
ドアホンコール	玄関子機の呼出ボタン				—	 通話終了
			♪ピンポン(連続鳴動)	♪ビー... (着信ランプ:黄色)		
見守り明るさ不足	見守りカメラ明るさ不足			—	早い橙色点滅 早い橙色点滅	メッセージ内容を確認し、対応します 室内の明るさを明るく調節してください
			♪ピッピッ	—		
機器異常	機器の異常を検知			—	早い橙色点滅 早い橙色点滅	取扱説明書を参照の上、対処します。必要に応じて施工業者または当社修理受付センターまたはお客様相談センターへご相談ください メッセージ内容を確認し、対応します
			♪ピッピッピッ	—		
受話器掛け忘れ	受話器を かけ忘れて 約45秒経過			—	—	メッセージ内容を確認し、対応します 受話器を戻します
			♪プー(連続鳴動)	—		