

	呼び出す	呼出を受ける			対応	復旧	
		親機 NFX-PC (ポップアップ)	PC用卓上型親機	ハンディナーズ (IOS-301JR)			廊下表示 集合廊下灯 / アダプター方式
一般呼出	コール						
		♪ピンポン(チャイム)/各種メロディ		♪ピー… (着信ランプ:黄色)	早い橙色点滅		通話終了もしくは 復旧ボタンを 押す
	ナースコール						
		♪ピンポン(チャイム)/各種メロディ		♪ピー… (着信ランプ:黄色)	早い橙色点滅		通話終了もしくは 復旧ボタンを 押す
	点滴呼出					呼出元を 確認し、 対応 します	
		♪ピンポン(チャイム)/各種メロディ		♪ピー… (着信ランプ:黄色)	早い橙色点滅		通話終了もしくは 復旧ボタンを 押す
	トイレ介助呼出					呼出元を 確認し、 対応 します	
		♪ピンポン(チャイム)/各種メロディ		♪ピー… (着信ランプ:黄色)	早い橙色点滅		通話終了もしくは 復旧ボタンを 押す
ドアホン呼出				—			
	♪ピンポン(チャイム)/各種メロディ		♪ピー… (着信ランプ:黄色)			通話終了	
解錠呼出				—			
	♪ピンポン(チャイム)/各種メロディ		♪ピー… (着信ランプ:黄色)			通話終了	
脱落断線 警報					呼出元を 確認し、 対応 します		
	♪プープー		♪ピーピー… (着信ランプ:紫色)	遅い橙色点滅		脱落・断線 を直します	

脱落断線  
警報  
呼出優先度