

1 ナースコールシステム  
で選択にあたり

2 V i r n u r s e

3 NFXシステム

4 ハンディナース  
対応個別線式  
ナースコール

5 ハンディナース  
システム

6 連絡システム

7 ナースコール  
Renovest

8 FAGUS

9 緊急通報装置

10 地域包括  
ケアシステム業務  
支援ソフトウェア

11 保守メンテナンス  
について

# NFX-LAN 特長

## オーダリング・電子カルテとの連携

患者さんの基本情報は、オーダリング情報の転用で入力不要。さらに、ハンディナースにも患者名を漢字で表示。(入力不要)

**オーダリング**

➔

**オーダリング情報**

担当番号 診療科目 呼出種別 病室・ベッド番号

心内 ナースコール  
11 301-1

有村 俊秀 聴言視動 飛 ●

呼出中H.N.番号 101

次呼出 ナースコール  
11 301-2 奥谷 佳正

患者名 障害情報 感染情報 救護区分



ボード型親機



卓上型親機



卓上型親機(選局ボタン付)

■ =LAN接続時に表示可能な情報

## ハンディナースに名前を表示

呼び出した患者さんを名前で確認できるので、誰から呼ばれたかがすぐわかり、迅速に対応ができます。

患者氏名

患者情報表示項目1

患者情報表示項目2

呼出種別

病室番号

ベッド番号



## LCD画面に自動的に患者情報・看護情報を表示

タッチパネルで入力の手間もなく、素早い対応をサポートします。

心内 ナースコール

11 301-1

有村 俊秀 聴言視動 飛 ●

ナースコール

着信履歴

11月10日 19:01 ナースコール 有村 俊秀

11月10日 08:22 ナースコール 鶴見 育久

11月10日 17:19 ナースコール 高橋 文人

11月10日 16:11 ナースコール 三谷慎太郎

着信履歴

聴取

心内 11 301-1

有村 俊秀 聴言視動 飛 ●

1 2 3 自動

4 5 6 勤務帯 切替 患者 設定 機能 設定

7 8 9 切替 履歴 履歴

\* 0 消 呼取 放送 H.N.呼出

操作ボタンに触れると操作案内(ガイダンス)が表示されます。

患者設定

目的のボタンを選んでください  
終了するときは終了を押してください

担当呼出設定 優先呼出設定

緊急表示設定 破綻設定

選択

担当呼出設定

設定する番号ボタンを押してください

勤務帯 日動 準夜動 夜動

担当

11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26

勤務帯選択画面

## 呼出履歴を活用

連続して呼出があった後の確認や、100件までさかのぼって履歴が確認できるので便利です。

着信履歴

11月10日 19:01 ナースコール 有村 俊秀

11月10日 08:22 ナースコール 鶴見 育久

11月10日 17:19 ナースコール 高橋 文人

11月10日 16:11 ナースコール 三谷慎太郎

着信履歴



呼出履歴を呼出履歴用PCへ蓄積します。蓄積されたデータをグラフ化するなどの呼出分析ができます。




呼出履歴 呼出分析

## 施設内のパソコンで呼出履歴を確認

施設内のパソコンとナースコールを接続し、パソコンに専用ソフトをインストールすることで、呼出履歴の確認ができます。

呼出履歴ソフトでの確認のほか、ログ(CSV形式)の出力に対応しています。

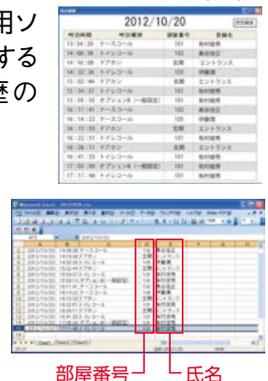

2012/10/20

部屋番号 氏名

➔P.438 参照