

# ハンディナースシステム 他社製PBXの連動にあたって

1 ナースコールシステム  
ご選択にあたって

2 Vi-nurse

3 NFXシステム

4 ハンディナース  
対応個別線式  
ナースコール

5 ハンディナース  
システム

6 連絡システム

7 ナースコール  
Renovest

8 FAGUS

9 緊急通報装置

10 地域包括  
ケアシステム業務  
支援ソフトウェア


11 保守メンテナンス  
について

## ■特長


- ナースコールシステムVi-nurse、NFXシリーズ、NBE、NBM-HPと接続し、患者さんからのナースコールをコードレス子機(PHS)で受け通話できます。
- 患者さんからナースコールがあるとコードレス子機のディスプレイに「呼出種別」および「部屋番号」、「ベッド番号」を表示し通話できます。(Vi-nurse、NFXシリーズ)

## ■システム構成例

[アダプタ未使用:デジタル(DN)] ナースコール制御装置とPBXを直接つなぎます。

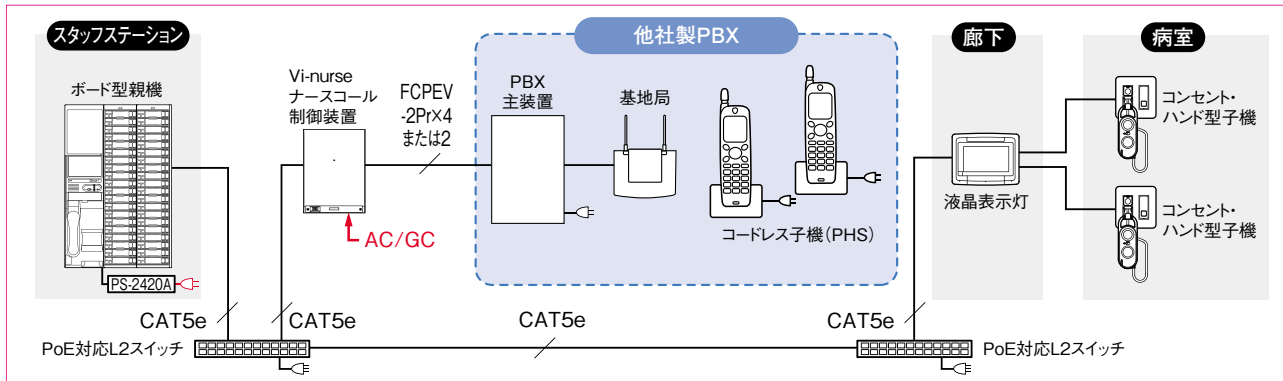

[NBW-AD-HP] ハンディナースシステムアダプターを使用します。

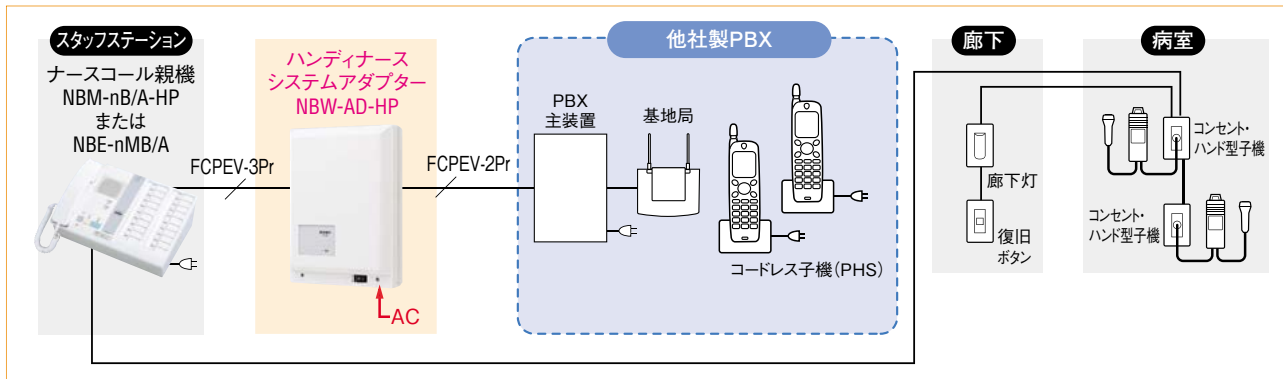

## ■注意事項

- ・接続するPBX・ビジネスホン主装置、PHSの組み合わせにより実現できる機能や表示などが異なる場合があります。
- ・連動実績のない場合は、事前に連動試験をさせていただきますようお願いいたします。
- ・上記一覧以外のナースコールシステムと接続する場合は弊社担当者までご相談ください。
- ・上記一覧以外のPBXと接続される場合は弊社担当者までご相談ください。
- ・コードレス子機 (PHS) の型番は、PBXメーカーにご確認ください。
- ※1 患者名は着信時には表示されず、通話中のみ表示されます。
- ※2 スマートフォンまたは無線IP電話機で通話中にナースコール呼出があった場合は、割り込み音は鳴動しません。
- ※3 漢字は表示連動不可。
- ※4 ナースコール親機のPS切替機能は対応していません。
- ※5 端末の患者情報は、半角カナ表示になります。
- ※6 登録可能な端末 (ビジネスホン、PHS) は、Vi-nurseは最大15台、NFX、NBE、NBM-HPは最大7台です。また同時に呼び出せる端末の台数は「1台のみ」か「全端末」のいずれかです。呼出スライド設定は使用できません。
- ※7 端末に患者名の表示はできません。また着信履歴は数字のみの表示となります。
- ※8 使用可能な通話路は4通話路までです。
- ※9 Vi-nurse (ver.2.00以降) のみ対応。旧バージョンの場合、システム全体のバージョンアップ作業 (有償) が必要です。
- ※10 呼出スライド時間は40秒以下でご使用ください (連続呼出の場合、約50秒で呼出切断されるため)。
- ※11 ソフトバージョンR02.02.02以前の場合、患者名は着信時に表示されず、通話中のみ表示されます (R02.03.00以降は着信時も表示されます)。

最新の接続可能メーカー、機種一覧は、弊社ホームページ (<http://www.aiphone.co.jp/>) 内、ハンディナースシステムの商品情報ページでご確認ください。



## 防水仕様PHSのご紹介

濡れた手でも安心して操作ができます。

販売元:ソフトバンク(株)



- 防水性能 IPX5/IPX7 相当

※PBXとの連動については、それぞれのメーカーにお問い合わせください。