

1 ナースコールシステム
で選択にあたって

2 V.I.R.Nurse

3 NFXシステム

4 ハンディナース
対応個別線式
ナースコール

5 ハンディナース
システム

6 連絡システム

7 ナースコール
Renovest

8 FAGUS

9 緊急通報装置

10 地域包括
ケアシステム業務
支援ソフトウェア

11 保守メンテナンス
について

動作一覧

FAGUS の場合

■緊急時動作

	発生・検知	住戸内	住戸玄関	スタッフルーム
トイレ緊急呼出	 トイレで緊急呼出ボタンを押す。	 予告音 30秒後 警報音 (遅延なし、10秒、20秒、30秒の中から設定)	 廊下灯 外設スピーカー 赤色点滅 警報音「緊急事態です。 トイレに来てください。」	 101 有村 俊秀 有村 花子 入居者名+「トイレ」+ 居室番号表示 警報音「ポッポポッ ○○号室のトイレに来てください」
水量センサー	 一定時間以上水が未使用 あるいは大量に使用の場合。	 予告音 5分後 警報音	 廊下灯 外設スピーカー 赤色点滅 警報音「水が未使用です。」 「水が連続使用です。」	 101 有村 俊秀 有村 花子 入居者名+「セイツ」+ 居室番号表示 警報音「ポロポロ ○○号室で生活異変が発生しました」
パッシブセンサー	 一定時間以上、人の動きがない 場合。(8~24時間)	 予告音 5分後 警報音	 廊下灯 外設スピーカー 赤色点滅 警報音「緊急事態が発生 しました。」	 101 有村 俊秀 有村 花子 入居者名+「セイツ」+ 居室番号表示 警報音「ポロポロ ○○号室で生活異変が発生しました」
トイレセンサー	 トイレ入室後約30分経過した場合。 (20分、30分、50分の中から設定)	 予告音 5分後 警報音	 廊下灯 外設スピーカー 赤色点滅 警報音「緊急事態です。 トイレに来てください。」	 101 有村 俊秀 有村 花子 入居者名+「ケンコウ」+ 居室番号表示 警報音「ポロポロ ○○号室で緊急事態発生」
ガス漏れ警報	 ガス漏れをガス警報器が検知。	 マンションインターホンタイプ親機 警報音「ガス漏れです。」	 廊下灯 玄関子機 赤色点滅 警報音「ガス漏れです。」	 101 有村 俊秀 有村 花子 入居者名+「ガス」+ 居室番号表示 警報音「ピッピッ ○○号室でガス漏れです」

■緊急時動作(警報受信~復旧まで)

	警報	パニックオープン	対処・復旧
セキュリティ警報	 「カサイ」+ 居室番号表示 警報音「ヒボヒボヒボ ○○号室で火事です」	 カチャッ	 生活監視用PCの警報音を 停止する。 必要に応じて個別または全戸一 斉に電気錠ドアチェーンを解錠。 対処後、居室内の復旧ボタンを 押して生活監視用PCで復旧。

■スタッフルーム呼出

	呼び出す	呼び出し受ける	通話	終話
通常呼出	 待受画面で[メニュー] ボタンを押します。	 101 有村 俊秀 有村 花子 スタッフ親機から呼出音、 居室番号がデジタル表示。	 受話器をとり、通話。	 もどす

■住戸呼出

	呼び出す	通話	終話
通常呼出	 タッチパネルで居室番号と呼出を押す。	 相手方がたら通話。	 受話器 もどす

■放送

	呼び出す	通話	終話
一斉個別放送	 受話器 あける 一斉放送あるいは居室番号と個別放送。	 放送。	 受話器 もどす