

呼出動作

基本操作方法

| 呼出優先度 | 呼び出す | 呼出を受ける | | | 対応 | 復旧 | |
|----------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|--|
| | | 親機 | ハンディナーズ (IOS-301JR) | 表示灯 | | | |
| 呼出優先度 A | 自動火災報知設備 | 救護区分が担送・護送に登録された患者、または任意に緊急表示設定された患者のベッドボタンが点滅表示 | 緊急表示 緊急事態が発生しました。自動火災報知設備をご確認ください。 | 着信中 JK | 救護区分が担送・護送に登録された患者、または任意に緊急表示設定された患者の表示灯のみ 早い赤色点滅 / 早い赤色点滅 | 自動火災報知設備を確認します | |
| | AEDの扉を開く | ダイヤルルーム | AED 呼出中 ダイヤルルーム | 着信中 ダイヤルルーム AED120 | 早い赤色点滅 / 早い赤色点滅 | 通報元を確認し、現場へかけつけます | |
| | 生体情報モータ | 有村 俊秀 | SpO2 呼出中 有村 俊秀 | 着信中 有村 俊秀 SpO101-1 | 早い赤色点滅 / 早い赤色点滅 | 通報元を確認し、現場へかけつけます | |
| | 優先呼出設定を行うと、優先度が下位の呼出も、この優先度になります。 | | | | | | |
| | 見守りコール | 有村 俊秀 | 見守りコール 呼出中 有村 俊秀 | 着信中 有村 俊秀 MC 101-1 | 早い赤色点滅 / 早い赤色点滅 | 復旧ボタンを押す (現場復旧) | |
| スタッフコール | 有村 俊秀 | スタッフコール 呼出中 有村 俊秀 | 着信中 有村 俊秀 SC 101-1 | 早い赤色点滅 / 早い赤色点滅 | 復旧ボタンを押す (現場復旧) | | |
| ペンダントコール | 有村 俊秀 | ペンダントコール 呼出中 有村 俊秀 | 着信中 有村 俊秀 PC 101-1 | 早い赤色点滅 / 早い赤色点滅 | 復旧ボタンを押す (現場復旧) | | |
| 徘徊コール | 有村 俊秀 | 徘徊コール 呼出中 有村 俊秀 | 着信中 有村 俊秀 HK 101-1 | 早い赤色点滅 / 早い赤色点滅 | 復旧ボタンを押す (現場復旧) | | |

※1: 設定により優先度を変更することができます。