

1 ナースコールシステム

2

3 NFXシステム

4 ハンディナースシステム

5 センザ！マブネシステム

6 ハンディナースシステム

7 接続システム

8 ナースコール

9 FOCUS

10 緊急通報装置

11 介護支援システム

12 保命システム

Vi-nurse

呼出優先度	呼び出す	呼出を受ける			対応	復旧	
		親機		ハンディナース (IOS-301JR)			
高 (高)	オプション1 オプション1 入力に 接続した センサー などが作動	PC親機(呼出ポップアップ表示)	親機(操作画面)	着信中 有村 俊秀 拒A O1 101-1	液晶表示灯 アダプター方式	早い緑色点滅 早い緑色点滅	復旧 復旧ボタン を押す (現場復旧)
		♪プルプルッ(連続鳴動)		♪ビービー... (着信ランプ:赤色)			
中 (中)	オプション2 オプション2 入力に 接続した センサー などが作動	PC親機(呼出ポップアップ表示)	親機(操作画面)	着信中 有村 俊秀 拒A O2 101-1	液晶表示灯 アダプター方式	早い緑色点滅 早い緑色点滅	復旧 復旧ボタン を押す (現場復旧)
		♪プルプルッ(連続鳴動)		♪ビービー... (着信ランプ:黄色)			
低 (低)	トイレコール	PC親機(呼出ポップアップ表示)	親機(操作画面)	着信中 TC 101	液晶表示灯 アダプター方式	早い赤色点滅 早い赤色点滅	復旧 復旧ボタン を押す (現場復旧)
		♪プルルルル(連続鳴動)		♪ビービー... (着信ランプ:赤色)			
中 (中)	バスコール	PC親機(呼出ポップアップ表示)	親機(操作画面)	着信中 BC 101	液晶表示灯 アダプター方式	早い赤色点滅 早い赤色点滅	復旧 復旧ボタン を押す (現場復旧)
		♪プルルルル(連続鳴動)		♪ビービー... (着信ランプ:赤色)			
高 (高)	トイレ異常 トイレ異常 センサーが 異常を検知	PC親機(呼出ポップアップ表示)	親機(操作画面)	着信中 有村 俊秀 拒A TT 101-1	液晶表示灯 アダプター方式	早い赤色点滅 早い赤色点滅	復旧 復旧ボタン を押す (現場復旧)
		♪プルルルル(連続鳴動)		♪ビービー... (着信ランプ:赤色)			
中 (中)	ナースコール	PC親機(呼出ポップアップ表示)	親機(操作画面)	着信中 有村 俊秀 拒A NC 101-1	液晶表示灯 アダプター方式	早い橙色点滅 早い橙色点滅	通話終了もしくは 復旧ボタンを 押す
		♪ピンポン(連続鳴動)		♪ビービー... (着信ランプ:黄色)			
低 (低)	オートセンス 大きな声 自動感知	PC親機(呼出ポップアップ表示)	親機(操作画面)	着信中 有村 俊秀 拒A OC 101-1	液晶表示灯 アダプター方式	早い橙色点滅 早い橙色点滅	通話終了もしくは 復旧ボタンを 押す
		♪ピンポン(連続鳴動)		♪ビービー... (着信ランプ:黄色)			