

1 ナースコールシステム

2

3 NFXシステム

4 ハンディナーズシステム

5 センザ！マブキシステム

6 ハンディナーズシステム

7 連絡システム

8 ナースコールシステム

9 FACUS

10 緊急通報装置

11 Non-nurseシステム

12 保命システム

呼出優先度 (高)	呼び出す	呼出を受ける			対応	復旧
		親機 PC親機(呼出ポップアップ表示)	親機(操作画面)	ハンディナーズ (IOS-301JR)		
脱落断線	脱落断線 約20秒後				早い橙色点滅 / 早い橙色点滅	呼出元を確認し、対応します
			♪プープー(連続鳴動)	♪ビービー... (着信ランプ:紫色)		脱落断線警報停止スイッチを停止側から脱落断線側に戻します
脱落停止	脱落断線警報停止スイッチを 戻し忘れた				早い橙色点滅 / 早い橙色点滅	呼出元を確認し、対応します
			♪プープー(連続鳴動)	♪ビービー... (着信ランプ:紫色)		
ドアホンコール	玄関子機の呼出ボタン				—	 通話終了
			♪ピンポン(連続鳴動)	♪ビー... (着信ランプ:黄色)		
機器異常	機器の異常を検知	—		—	早い橙色点滅 / 早い橙色点滅	取扱説明書を参照の上、対処します。必要に応じて施工業者または当社修理受付センターまたはお客様相談センターへご相談ください
			♪ピッピッピッ			
見守り停止	見守りカメラ機能停止	—		—	早い橙色点滅 / 早い橙色点滅	見守りカメラの見守り停止/再開ボタンを長押しして、見守り機能を再開します メッセージ内容を確認し、対応します
			♪ピンポン(連続鳴動)			
受話器掛け忘れ	受話器を かけ忘れて 約45秒経過	—		—	—	メッセージ内容を確認し、対応します
			♪プー——(連続鳴動)			受話器を戻します