

子機・コンセント

ハンド型子機 呼出握りボタン



ハンド型子機
NL-SB (税別) 30日
希望小売価格
12,500円 (税別)
●コード長 約1.5m

抗菌仕様



呼出握りボタン
NLR-8 (税別) 30日
希望小売価格
4,000円 (税別)
●コード長 約1.5m

抗菌仕様



呼出握りボタン
NLR-8-TT (税別) 30日
希望小売価格
4,800円 (税別)
●点滴・トイレ介助ボタン付
●コード長 約1.5m

抗菌仕様



呼出握りボタン
NLR-8NB-0.3 (税別) 30日
希望小売価格
12,000円 (税別)
●コード長 約30cm
●サイドボタンなし

抗菌仕様

●「点滴終了」や「トイレ介助」の用件を話さなくても親機に知らせます。

呼出握りボタン

品番	希望小売価格(税別)	コード長	点滴・トイレ介助ボタン	サイドボタン	納期
NLR-8	4,000円	1.5m	—	○	税別30日
NLR-8-0.3	10,500円	30cm	—	○	税別30日
NLR-8-TT	4,800円	1.5m	○	○	税別30日
NLR-8NB-0.3	12,000円	30cm	—	—	税別30日

コンセント



コンセント
NLR-C2 (税別) 30日
希望小売価格
15,500円 (税別)
●復旧ボタン付
プレートは別途※1



コンセント
(緊急呼出ボタン付)
NLR-CS2 (税別) 30日
希望小売価格
16,500円 (税別)
●復旧ボタン付
プレートは別途※2



子機 (コンセント付)
NLR-C2 (税別) 30日
希望小売価格
16,800円 (税別)
●復旧ボタン付
プレートは別途※2




子機 (コンセント・緊急呼出ボタン付)
NLR-CS2 (税別) 30日
希望小売価格
22,000円 (税別)
●復旧ボタン付
プレートは別途※3

子機

呼出握りボタン用大型ボタン (NLR-BC) の取付方法

呼出握りボタン用大型ボタン(NLR-BC)は、呼出握りボタン(NLR-8、NLR-8-TTなど)をセットし、使用します。

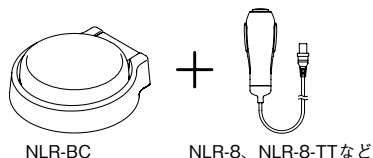


ご注意

- ※呼出握りボタン(点滴・トイレ介助ボタン付)を使用する場合は、点滴・トイレ介助ボタンは使えません。
- ※フタとケースの間にゴミ等が入ると、ボタンが押せなくなり、呼出しができなくなることがあります。
- ※機器を取り付けた後は、必ず呼出し確認を行ってください。

取付方法


1. フタをケースから取りはずす

- ① ケース裏側の穴に指を入れ、しっかりとケースを支えたまふたを押し上げます。
- ② フタをケースに対して垂直になるよう、立てます。
- ③ フタをスライドして取りはずします。

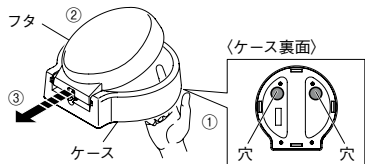


2. 呼出握りボタンをケースに取り付ける

- ① 呼出握りボタンの先端を図のように差し込みます。(呼出ボタン(握り部分)が上下になるように入れます。)
- ② 呼出握りボタンのコード側をガイド部にはめ込みます。
- ③ コードが溝に納まったことを確認してください。

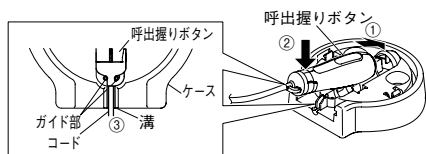


3. フタをケースに取り付ける

ケースの溝にフタの突起部をはめ込みます。

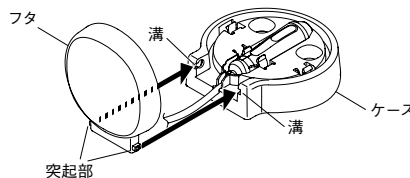

4. ケースを閉める

フタの突起部が溝にしっかりと入ったことを確認し、ゆっくりとフタを閉め、「カチッ」と鳴るまで押してください。閉めた後、必ず動作確認を行ってください。

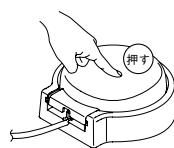

ご注意

- ※フタの突起部が溝にしっかりと納まっていないままフタを閉めると、フタまたはケースが破損する恐れがあります。
- ※握りボタンが接続されたままフタを閉めると、呼出ボタンが押され、呼出しがかかることがあります。

■取付図(mm)

