

# NFX-PC 呼出動作

## ■基本操作方法

呼出優先度 (高)	呼び出す	呼出を受ける			廊下表示	対応	復旧
		親機		ハンディナース (IOS-301JR)			
		NFX-PC (ポップアップ)	PC用卓上型親機		集合廊下灯 / アダプター方式		
緊急呼出	生体情報モータ ※1			着信中 有村 俊秀 担12 SpO303-1	—		通話をすることで復旧します。  ※生体情報モータのアラームは復旧しません。
	スタッフコール			着信中 有村 俊秀 担11 SC 303-1	早い赤色点滅 / 点滅		復旧ボタンを押す (現場復旧)
	ペンダントコール			着信中 PC 303-1	早い赤色点滅		復旧ボタンを押す (現場復旧)
	徘徊			着信中 HK 303-1	早い赤色点滅		復旧ボタンを押す (現場復旧)
↑	オプションA ※2			着信中 有村 俊秀 担11 OA 303-1	早い赤色点滅 / 点滅		通話終了もしくは復旧ボタンを押す
	トイレコール			着信中 TC 320-9	遅い赤色点滅 / 遅い赤色点滅		通話終了もしくは復旧ボタンを押す
一般呼出	バスコール			着信中 BC 321-9	遅い赤色点滅 / 遅い赤色点滅		通話終了もしくは復旧ボタンを押す
	オプションB ※2			着信中 加藤 文人 担11 OB 305-1	早い橙色点滅 / 点灯		通話終了もしくは復旧ボタンを押す

※1:制御装置と接続した場合。 ※2:設定により優先度を変更することができます。

- 1 ナースコールシステム
- 2 呼び出し
- 3 **NFXシステム**
- 4 ハンディナース
- 5 マネージャー
- 6 ハンディナース
- 7 連絡システム
- 8 ナースコール
- 9 FOCUS
- 10 緊急通報装置
- 11 生体情報モータ
- 12 バスコールシステム