

NFX-LAN 呼出動作

基本操作方法

呼出優先度 (高)	呼び出す	呼出を受ける		廊下表示		対応	復旧	
		親機	ハンディナース (IOS-301JR)	集合廊下灯	アダプター方式			
緊急呼出	生体情報モータ ※1				—		 通報元を確認し、現場へかけつけます	通話することで復旧します。 <small>※生体情報モータのアラームは復旧しません。</small>
		♪ブルブルブル/各種メロディ	♪ビービー、ビービー… (着信ランプ:赤色)					
	スタックコール						 通報元を確認し、現場へかけつけます	 復旧ボタンを押す (現場復旧)
		♪ブルブルブル/各種メロディ	♪ビービー、ビービー… (着信ランプ:赤色)					
	ペンダントコール						 通報元を確認し、現場へかけつけます	 復旧ボタンを押す (現場復旧)
		♪ブルブルブル/各種メロディ	♪ビービー、ビービー… (着信ランプ:赤色)					
	徘徊						 通報元を確認し、現場へかけつけます	 復旧ボタンを押す (現場復旧)
		♪ブルブルブル/各種メロディ	♪ビービー、ビービー… (着信ランプ:赤色)					
	オプションA ※2	センサーが緊急異常を感知					 通報元を確認し、現場へかけつけます	 通話終了もしくは復旧ボタンを押す
		♪ブルブルブル/各種メロディ	♪ビービー、ビービー… (着信ランプ:赤色)					
	トイレコール						 通報元を確認し、現場へかけつけます	 通話終了もしくは復旧ボタンを押す
		♪ブルブルブル/各種メロディ	♪ビー… (着信ランプ:黄色)					
バスコール						 通報元を確認し、現場へかけつけます	 通話終了もしくは復旧ボタンを押す	
	♪ブルブルブル/各種メロディ	♪ビー… (着信ランプ:黄色)						
オプションB ※2	センサーが異常を感知					 通報元を確認し、現場へかけつけます	 通話終了もしくは復旧ボタンを押す	
	♪ピンポン(チャイム)/各種メロディ	♪ビー… (着信ランプ:黄色)						

※1:制御装置と接続した場合。 ※2:設定により優先度を変更することができます。

- 1 ナースコールシステム
- 2 VV
- 3 NFXシステム
- 4 ハンディナース
- 5 センサー
- 6 ハンディナース
- 7 連絡システム
- 8 ナースコール
- 9 FOCUS
- 10 緊急通報装置
- 11 生体情報システム
- 12 保護システム