

NFX 呼出動作

■基本操作方法 ※呼出の優先順位が高い順に記載しています

呼出優先度 (高)	呼び出す	呼出を受ける		廊下表示 集合廊下灯 / アダプター方式	対応	復旧	
		親機	ハンディナース (IOS-301JR)				
緊急呼出	生体情報モータ ※1				—	 通報元を確認し、現場へかけつけます	通話をする事で復旧します。 ※生体情報モニタのアラームは復旧しません。
		♪ブルブルブルッ/各種メロディ	♪ピーピーピー… (着信ランプ:赤色)				
	スタッフコール					 通報元を確認し、現場へかけつけます	復旧ボタンを押す (現場復旧)
		♪ブルブルブルッ/各種メロディ	♪ピーピーピー… (着信ランプ:赤色)				
	ペンダントコール					 通報元を確認し、現場へかけつけます	復旧ボタンを押す (現場復旧)
		♪ブルブルブルッ/各種メロディ	♪ピーピーピー… (着信ランプ:赤色)				
	徘徊					 通報元を確認し、現場へかけつけます	復旧ボタンを押す (現場復旧)
		受信機が発信機の接近をキャッチ・通報	♪ブルブルブルッ/各種メロディ	♪ピーピーピー… (着信ランプ:赤色)			
	オプションA ※2					 通報元を確認し、現場へかけつけます	通話終了もしくは復旧ボタンを押す
		センサーが緊急異常を感知	♪ブルブルブルッ/各種メロディ	♪ピーピーピー… (着信ランプ:赤色)			
	トイレコール					 通報元を確認し、現場へかけつけます	通話終了もしくは復旧ボタンを押す
		♪プルルルル/各種メロディ	♪ピー… (着信ランプ:黄色)				
バスコール					 通報元を確認し、現場へかけつけます	通話終了もしくは復旧ボタンを押す	
	♪プルルルル/各種メロディ	♪ピー… (着信ランプ:黄色)					
オプションB ※2					 通報元を確認し、現場へかけつけます	通話終了もしくは復旧ボタンを押す	
	センサーが異常を感知	♪ピンポン(チャイム)/各種メロディ	♪ピー… (着信ランプ:黄色)				

※1:制御装置と接続した場合。 ※2:設定により優先度を変更することができます。

- 1 ナースコールシステム
- 2 看護師
- 3 NFXシステム
- 4 ハンディナース
- 5 センサー
- 6 ハンディナース
- 7 連絡システム
- 8 ナースコール
- 9 FOCUS
- 10 緊急通報装置
- 11 生体情報モータ
- 12 徘徊検知システム