

# 同時通話ナースコールNBM-DN

## ハンディナーズシステム

→P.490 参照



## スタッフステーション

### ナースコール親機

卓上型



20局用卓上型親機  
**NBM-20BH-DN** (税別30円)  
希望小売価格  
450,000円(税別)



40局用卓上型親機  
**NBM-40BH-DN** (税別30円)  
希望小売価格  
680,000円(税別)

●壁掛で使用する場合


#### 取付補助板

20局用	40局用
*NBM-20BH-DN用 NBR-20K 13,000円(税別)	*NBM-40BH-DN用 NBR-40K 15,000円(税別)


## 特長

### ルーム単位呼出・ルーム単位通話

ルーム単位で患者さんからの呼出を表示し、ルーム単位でお話しできます。

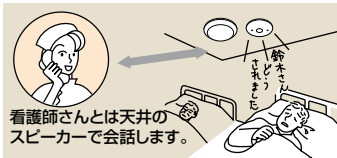

看護師さんとは天井のスピーカーで会話します。

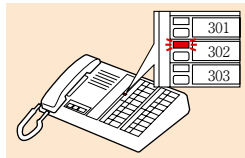

### ハンディナーズシステムと接続可能

ハンディナーズでは、移動中やベッドサイドにいても、患者さんからの呼出にその場で応答できます。

スタッフステーション以外からでも患者さんへの一斉放送や、呼出・通話ができます。また、看護師さんどうしの連絡ができます。

### PS切替機能

夜間など看護師さんの人手が少ないときは、患者さんからの呼出を別フロアのハンディナーズで受けることができます(PS切替)。

### 呼出履歴ソフト(無償ダウンロード)

パソコン(市販品)で病室(居室)番号、呼出時刻のほか、呼出から応答までかかった時間(応答時間)も記録されます。

→P.460 参照

## 操作方法

	呼出操作	廊下	ハンディナーズ (呼出履歴ソフトで登録した場合)	スタッフステーション	操作
通常の呼出	 呼出握りボタンを押します。	 赤色点灯で知らせます。	 どこからの呼出が表示されます。	 呼出音はメロディ音とチャイム音の2種類です。該当病室の表示灯が点灯します。	 看護師さんと通話します。
トイレ呼出	 トイレ呼出ボタンを押します。	 赤色点灯で知らせます。	 どこからの呼出が表示されます。	 呼出音はメロディ音とチャイム音の2種類です。	 呼出元を確認し、現場へかけつけます。