

同時通話ナースコール NBE-J・NBM-HP

ルーム ルーム単位
単位通話 呼出表示

ハンディナースシステム

▶P.490 参照



スタッフステーション

ナースコール親機

ボード型



卓上型



60局用卓上型親機
NBM-60B/A-HP ●40B
希望小売価格
781,000円(税別)

40局用ボード型親機
NBE-40MB/A-J ●30B
希望小売価格
1,017,000円(税別)

■NBM-HP価格一覧

品番	局数	希望小売価格(税別)	納期
NBM-60B/A-HP	60局	781,000円	●40B
NBM-80B/A-HP	80局	963,000円	●40B
NBM-100B/A-HP	100局	1,166,000円	●40B

■NBE-J価格一覧

品番	局数	希望小売価格(税別)	納期
NBE-20MB/A-J	20局	856,000円	●30B
NBE-40MB/A-J	40局	1,017,000円	●30B
NBE-60MB/A-J	60局	1,177,000円	●30B
NBE-80MB/A-J	80局	1,338,000円	●30B
NBE-100MB/A-J	100局	1,498,000円	●30B


●壁掛で使用する場合は、当社担当者までご相談ください。

ハンディナース対応個別線式ナースコール

特長

ルーム単位呼出・ルーム単位通話

ルーム単位で患者さんからの呼出を表示し、ルーム単位でお話しできます。

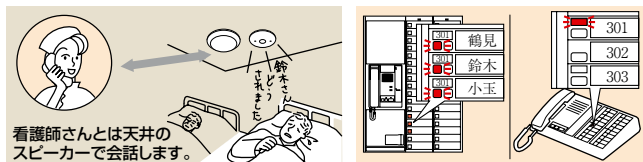

※ボード型親機は該当する病室の全ての患者さんの表示灯が点灯します。

ハンディナースシステムと接続可能

ハンディナースでは、移動中やベッドサイドにいても、患者さんからの呼出にその場で応答できます。

スタッフステーション以外からでも患者さんへの一斉放送や、呼出・通話ができます。また、看護師さんどうしの連絡ができます。

PS切替機能

夜間など看護師さんの人手が少ないときは、患者さんからの呼出を別フロアのハンディナースで受けることができます(PS切替)。

操作方法

	呼出操作	廊下	ハンディナース	スタッフステーション	操作
通常の呼出	 呼出握りボタンを押します。	 赤色点灯で知らせます。	 どこからの呼出が表示されます。	 呼出音はメロディ音とチャイム音の2種類です。該当病室のすべての表示灯が点灯します。	 看護師さんと通話します。
トイレ呼出	 トイレ呼出ボタンを押します。	 赤色点灯で知らせます。	 どこからの呼出が表示されます。	 呼出音はメロディ音とチャイム音の2種類です。	 呼出元を確認し、現場へかけつけます。