



## ■外観図

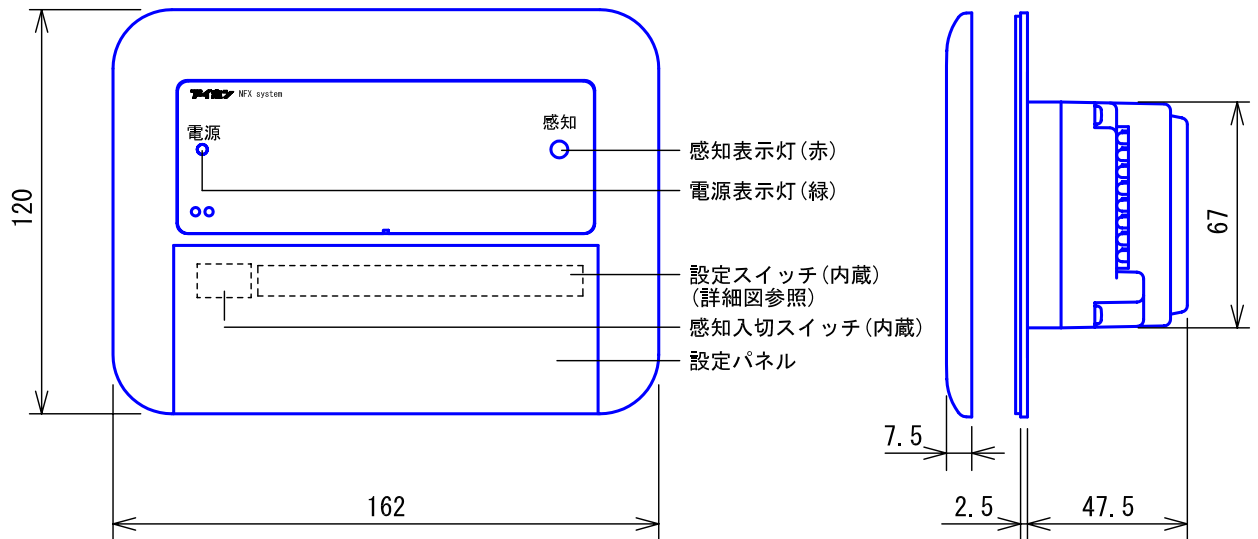


## ●取付寸法

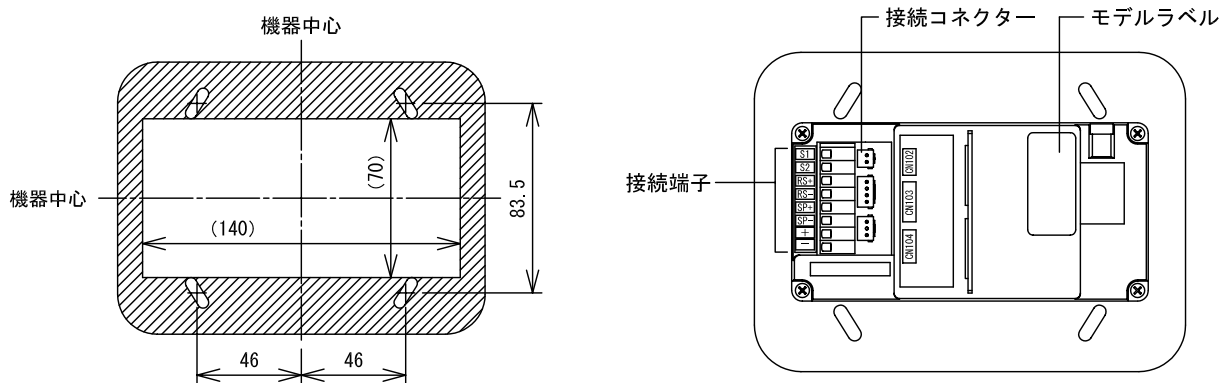

## ■仕様

消費電流	待受時 約85mA 最大約100mA	材質	自己消火性ABS樹脂					
感知レベル	マイク面上 約60~80dB	質量	約350g					
形状	壁埋込型	色調	スノーホワイト (5Y9.3/0.1 近似マンセル値)					
適合ボックス	JIS3個用スイッチボックス・カバー付							
品名	自動感知アダプター	図名	外観図/仕様	単位	mm	作成	2008年4月1日	
品番	NFX-AS	図番	NZ14406-1-2	頁	1/2	改訂	3	<b>アイホン株式会社</b>

## ■ 接続図

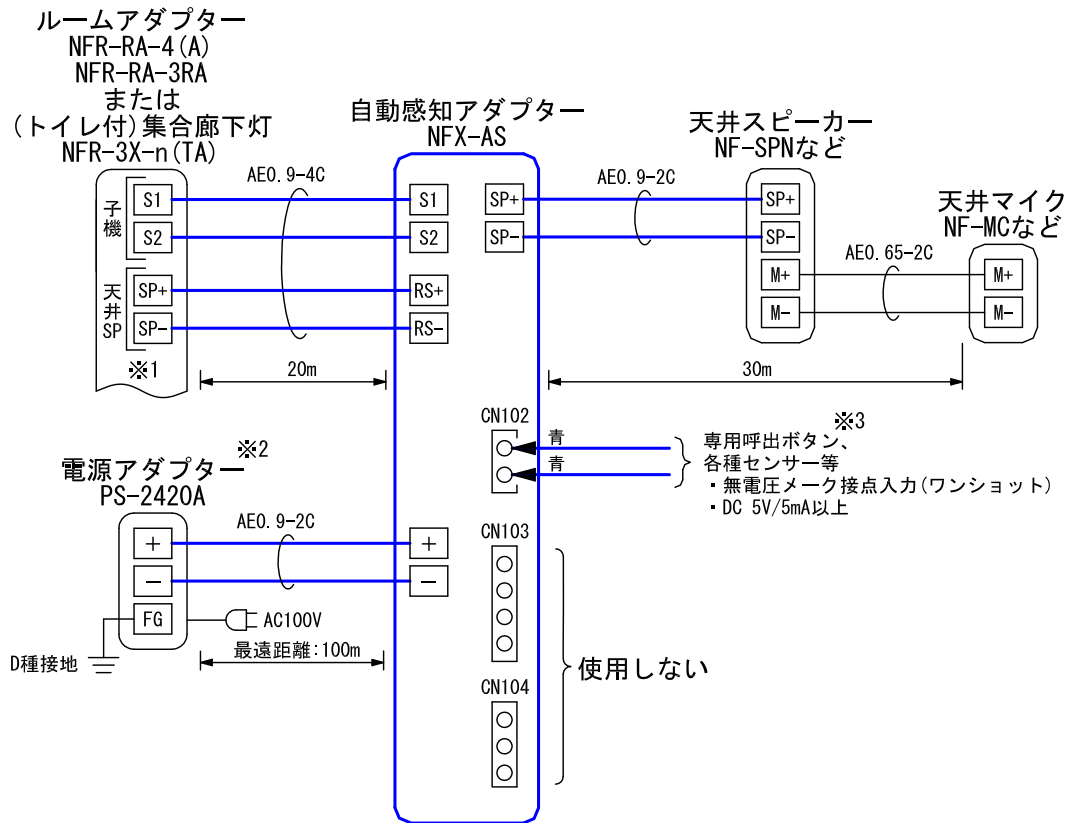

※1. ルームアダプター及び(トイレ付)集合廊下灯は「ルーム単位通話」設定で使用すること。

※2. 電源PS-2420Aを複数使用する場合、出力(+ -)同士を並列接続しないこと。

※3. CN102は必要に応じて使用すること。

## ■ 制約事項

- 自動感知アダプターは電源アダプター(PS-2420A)1台で10台接続可

## ■ 機能一覧


- 音感知(感知表示灯点灯)による親機への呼出
- 感知入切スイッチ押下による電源表示灯点灯
- 無電圧メーク接点入力時、ナースコール親機への呼出・通話

## ■ 設定項目

- 感度設定(レベル1~4) ※1..... SW1-2~5
- 高周波カット(感知する/感知しない) ..... SW1-7
- 感知時間(短い時間の音を感知する/感知しない) ..... SW1-8
- OP呼出 ※2..... SW2-1
- 通常呼出 ※2..... SW2-2
- 未使用..... SW1-1, 6, SW2-3, 4

※1. SW1-2~5は必ずいずれか1つをONにする。

※2. OP呼出、通常呼出は必ずどちらか1つをONにする。

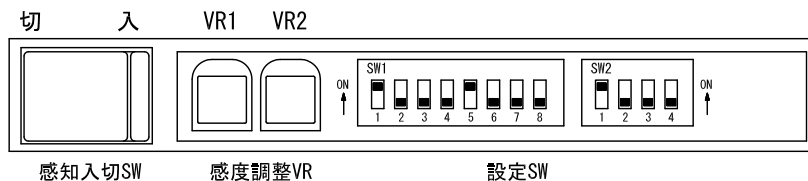

品名	自動感知アダプター	図名	接続図/制約事項/機能一覧/設定項目		単位	mm	作成	2014年3月12日
品番	NFX-AS	図番	NZ14406-2-2	頁	2/2	改訂	7	<b>アイホン株式会社</b>