



## ■外観図

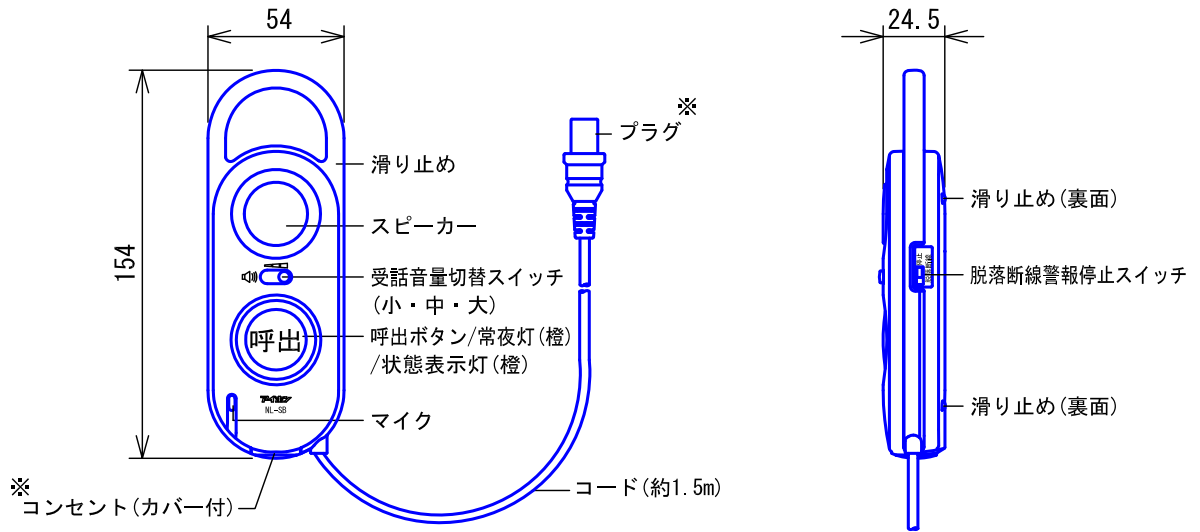

※: コンセント破損防止のため、約30N(約3kgf)の張力が働くとプラグが外れる。  
ただし、引っ張る方向によってはコンセントが破損する恐れがある。

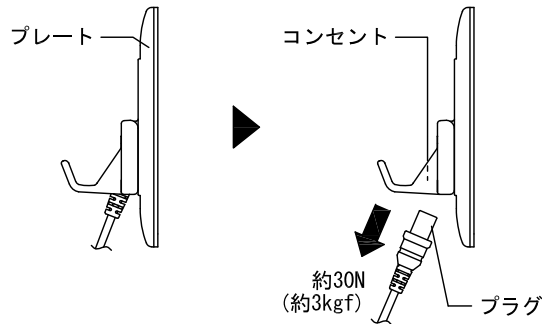

## ■仕様

形状	ハンド型	色調	本体: スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
使用周囲温度	0~40℃		呼出ボタン・コード: オレンジ
使用湿度範囲	相対湿度75%未満	備考	抗菌仕様
材質	自己消火性ABS樹脂		
質量	約120g		

品名	ハンド型子機	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成	2014年9月30日
品番	NL-SB	図番	N59552-1-2	頁	1/2	改訂	1	<b>アイホン株式会社</b>

## ■制約事項

- ハンド型子機 (NL-SB) 同士の2台直列接続は不可。
- 1台のベッドに対し、1台のみ使用可能。  
(コンセントが並列接続されている場合、どちらかのコンセントに1台のみ接続可能。)
- コンセントにハンド型子機 (NL-SB) のプラグを接続した後、必ず呼出確認を行うこと。
- ハンド型子機 (NL-SB) のコンセントを使用しない場合、カバーを付けること。
- 使用する部屋の通話単位がルーム単位通話に設定された場合、通話するマイク・スピーカーが決められており、ハンド型子機 (NL-SB) をコンセントに接続しても本体のマイク・スピーカーは使用不可。
- ハンド型子機 (NL-SB) のコンセントへ接続しない場合は、脱落断線警報停止スイッチを[停止]側にすること。

## ■機能一覧

- 呼出ボタン押下による、親機への呼出/通話
- 親機で設定した夜間時間帯に、常夜灯が自動で点灯。またベッド毎に常夜灯ON/OFFの設定が可能
- スピーカー/マイク付のコンセント (NL-C2、NL-CS2) にハンド型子機を接続した場合、ハンド型子機側のスピーカー/マイクのみが有効となる(自動切替)
- ハンド型子機 (NL-SB) のコンセントに接続できる機器は、NLR-8、NLR-8-TT、NLR-8-0.3、NLR-8WR、NLR-9MC、NLR-CA-OP、NLR-TA、NLR-EA
- プラグは、NLR-C2、NLR-CS2、NL-C2、NL-CS2、NLR-CA-OP、NLR-TA、NLR-EAに接続可能
- 状態表示灯(常夜灯)の状態一覧

状態	状態表示灯(常夜灯)	
	常夜灯消灯時 (橙色)	常夜灯点灯時 (橙色)
初期化	消灯	消灯
待受(運用中)	消灯	点灯
待受(復旧待ち)	点滅	点滅
呼出中	点滅	点滅
通話中	消灯	消灯
常夜灯	消灯	点灯
放送受信	消灯	消灯
モニター受信	消灯	点灯

## ■設定項目

- ハンド型子機のコンセントへ接続した機器が脱落・断線時に通報/停止…脱落断線警報停止スイッチ(出荷時：停止)
- 受話音量(スピーカー)を(小・中・大)で切替……………受話音量切替スイッチ(出荷時：大)

品名	ハンド型子機	図名	制約事項/機能一覧/設定項目		単位	mm	作成	2014年9月30日
品番	NL-SB	図番	N59552-2-2	頁	2/2	改訂	1	<b>アイホン株式会社</b>