



■外観図

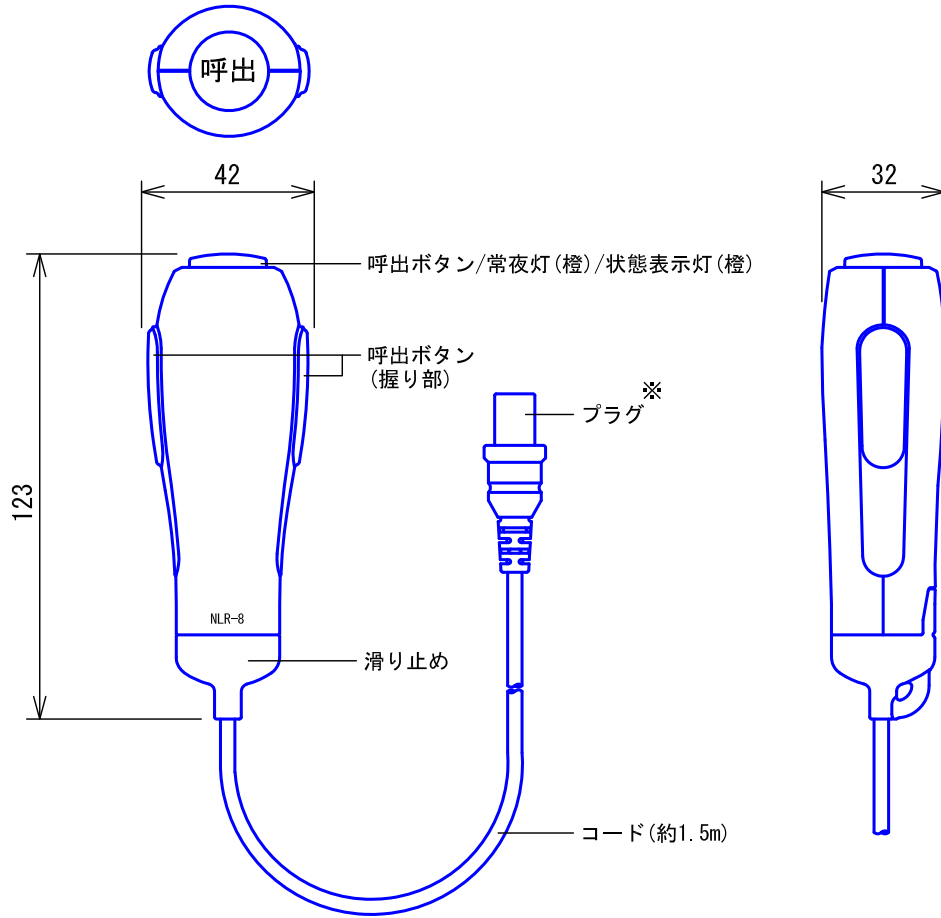

※. プレートのコンセント破損防止のため、約30N(約3kgf)の張力が働くとプラグが外れる。ただし、引っ張る方向によってはプレートのコンセントが破損する恐れがある。

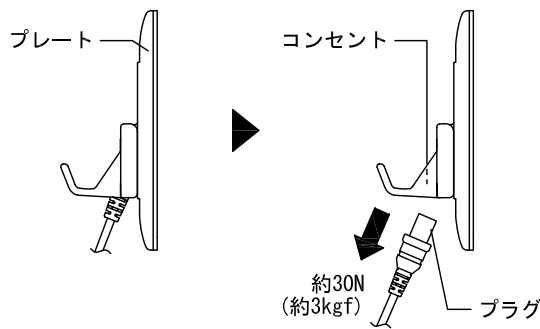

■仕様

材質	自己消火性ABS樹脂	色調	本体：スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値) 呼出ボタン(握り部)・コード・滑り止め：オレンジ 呼出ボタン：乳白					
質量	約80g		備考 握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様					
使用周囲温度	0~40℃							
使用湿度範囲	相対湿度75%未満	備考						
品名	呼出握りボタン (コード長1.5m)	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成	2014年9月30日
品番	NLR-8	図番	N59530-1-2	頁	1/2	改訂	1	<b>アイホン株式会社</b>

## ■制約事項

- 1台のベッドに対し、1台のみ使用可能。  
(コンセントが並列接続されている場合、どちらかのコンセントに1台のみ接続可能)
- コンセントに呼出握りボタン(NLR-8)のプラグを接続した後、必ず呼出確認を行うこと。

## ■機能一覧

- 呼出ボタン押下による、親機への呼出/通話
- 親機で設定した夜間時間帯に、常夜灯が自動で点灯。またベッド毎に常夜灯ON/OFFの設定が可能
- プラグは、NLR-C2、NLR-CS2、NL-C2、NL-CS2、NL-SB、NLR-CA-OP、NLR-TA、NLR-EAに接続可能
- 呼出ボタン(握り部)が不要の場合は、握りボタン用アタッチメント(NLR-BA)を装着することにより握り部のボタンを使用不可とすることが可能
- 状態表示灯(常夜灯)の状態一覧

状態	状態表示灯(常夜灯)	
	常夜灯消灯時 (橙色)	常夜灯点灯時 (橙色)
初期化	消灯	消灯
待受(運用中)	消灯	点灯
待受(復旧待ち)	点滅	点滅
呼出中	点滅	点滅
通話中	消灯	消灯
常夜灯	消灯	点灯
放送受信	消灯	消灯
モニター受信	消灯	点灯

品名	呼出握りボタン (コード長1.5m)	図名	制約事項/機能一覧		単位	mm	作成	2014年9月30日
品番	NLR-8	図番	N59530-2-2	頁	2/2	改訂	1	<b>アイホン株式会社</b>