

NFX-PC 呼出動作

1 ナースコールシステム
で選択にあたる

2 Nurse
Vier

3 NFXシステム

4 ハンディナース
対応個別線式
ナースコール

5 ハンディナース
システム

6 連絡システム

7 ナースコール
Renovest

8 FAGUS

9 緊急通報装置

10 地域包括
ケアシステム業務
支援ソフトウェア

11 保守メンテナンス
について

■基本操作方法

呼出優先度 (高)	呼び出す	呼出を受ける			対応	復旧
		親機		ハンディナース (IOS-301JR)		
緊急呼出	生体情報モタ※1	NFX-PC (ポップアップ)	PC用卓上型親機	着信中 有村 俊秀 担12 SpO303-1	集合廊下灯 アダプター方式	通報元を確認し、現場へかけつけます ※生体情報モタのアラームは復旧しません。
		SpO2 303-1 アヤメ	SpO2 303-1	着信中 有村 俊秀 担11 SC 303-1	早い赤色点滅	
	スタッフコール	スタッフコール	着信中 有村 俊秀 担11 SC 303-1	早い赤色点滅	復旧ボタンを押す (現場復旧)	
	ペンダントコール	ペンダントコール	着信中 PC 303-1	早い赤色点滅		
一般呼出	徘徊	徘徊	徘徊	着信中 HK 303-1	早い赤色点滅	通報元を確認し、現場へかけつけます 復旧ボタンを押す (現場復旧)
		出入口	出入口	着信中 OA 303-1	早い赤色点滅	
緊急通報装置	センサーが緊急異常を感知	オプションA	オプションA	着信中 有村 俊秀 担11 OA 303-1	早い赤色点滅	通報元を確認し、現場へかけつけます 通話終了もしくは復旧ボタンを押す
		WCトイレ	トイレコール	着信中 TC 320-9	遅い赤色点滅	
保守メンテナンス	センサーが異常を感知	オプションB	オプションB	着信中 加藤 文人 担11 OB 305-1	早い赤色点滅	通話終了もしくは復旧ボタンを押す
		BTバス	バスコール	着信中 BC 321-9	遅い赤色点滅	

※1:制御装置と接続した場合。 ※2:設定により優先度を変更することができます。