

NFX-LAN 呼出動作

1 ナースコールシステム
ご選択にあたって

2 V i r n u r s e

3 NFXシステム

4 ハンディナース
対応個別線式
ナースコール

5 ハンディナース
システム

6 接続システム

7 ナースコール
Renovest

8 FAGUS

9 緊急通報装置

10 地域包括
ケアシステム業務
支援ソフトウェア

11 保守メンテナンス
について

基本操作方法

呼出優先度 (高)	呼び出す	呼出を受ける			対応	復旧
		親機	ハンディナース (IOS-301JR)	廊下表示 集廊下灯 / アダプター方式		
緊急呼出	生体情報モタ ※1 		着信中 有村 俊秀 担 12 SpO303-1	—		通話することで復旧します。 ※生体情報モタのアラームは復旧しません。
	スタンコール 		着信中 有村 俊秀 担 11 SC 303-1	早い赤色点滅 点滅 早い赤色点滅		復旧ボタンを押す (現場復旧)
	ペンダントコール 		着信中 PC 303-1	早い赤色点滅		復旧ボタンを押す (現場復旧)
	徘徊 受信機が発信機の接近をキャッチ・通報		着信中 HK 303-1	早い赤色点滅		復旧ボタンを押す (現場復旧)
	オプションA ※2 センサーが緊急異常を感知		着信中 有村 俊秀 担 11 OA 303-1	早い赤色点滅 点滅 早い赤色点滅		通話終了もしくは復旧ボタンを押す
一般呼出	トイレコール 		着信中 TC 320-1	遅い赤色点滅 遅い赤色点滅		通話終了もしくは復旧ボタンを押す
	バスコール 		着信中 BC 321-1	遅い赤色点滅 遅い赤色点滅		通話終了もしくは復旧ボタンを押す
	オプションB ※2 センサーが異常を感知		着信中 有村 俊秀 担 11 OB 305-1	早い橙色点滅 点灯 早い橙色点滅		通話終了もしくは復旧ボタンを押す

※1:制御装置と接続した場合。 ※2:設定により優先度を変更することができます。