

1 ナースコールシステム  
ご選択にあたって

2 Nurse V.I.R.E

3 NFXシステム

4 ハンディナース  
対応個別線式  
ナースコール

5 ハンディナース  
システム

6 連絡システム

7 ナースコール  
Renovest

8 FAGUS

9 緊急通報装置

10 地域包括  
ケアシステム業務  
支援ソフトウェア

11 保守メンテナンス  
について

**FAGUS** ライトの場合

■緊急時動作

	発生・検知	住戸内	住戸玄関	スタッフルーム
トイレ緊急呼出	 トイレで緊急呼出ボタンを押す。	 予告音 30秒後 → 警報音 (遅延なし、10秒、20秒、30秒の中から設定)	廊下灯 外設スピーカー 赤色点滅  警報音「緊急事態です。 トイレに来てください。」	 ボッポッポッ 「トイレ」+ 居室番号表示 警報音「ボッポッポッ ○○号室のトイレに来てください」
生活異変通報	水量センサー  一定時間以上水が未使用 あるいは大量に使用の場合。	 予告音 5分後 → 警報音	廊下灯 外設スピーカー 赤色点滅  警報音「水が未使用です」 「水が連続使用です」	 ボロロロロ 「セイカツ」+ 居室番号表示 警報音「ボロロロロ ○○号室で生活異変が発生しました」
	バッドセンサー  一定時間以上、人の動きがない 場合。(8~24時間)	 予告音 5分後 → 警報音	廊下灯 外設スピーカー 赤色点滅  警報音「緊急事態が発生 しました。」	 ボロロロロ 「セイカツ」+ 居室番号表示 警報音「ボロロロロ ○○号室で生活異変が発生しました」
健康異変通報	トイレセンサー  トイレ入室後約30分経過した場合。 (20分、30分、50分の中から設定)	 予告音 5分後 → 警報音	廊下灯 外設スピーカー 赤色点滅  警報音「緊急事態です。 トイレに来てください。」	 ボロロロロ 「ケンコウ」+ 居室番号表示 警報音「ボロロロロ ○○号室で緊急事態発生」
セキュリティ警報	ガス漏れ警報  ガス漏れをガス警報器が検知。	 マンションインターホンタイプ親機 ビッピッピン ビッピッピン 警報音「ガス漏れです。」	廊下灯 玄関子機 赤色点滅  ビッピッピン ビッピッピン 赤色点滅 警報音「ガス漏れです。」	 ビッピッピン 「ガス」+ 居室番号表示 警報音「ビッピッピン ○○号室でガス漏れです」

■緊急時動作(警報受信~復旧まで)

	警報	パニックオープン	対処・復旧
セキュリティ警報	 ビボビボ 「カサイ」+ 居室番号表示 警報音「ビボビボ ○○号室で火事です」	 カチャ 設定により、電気錠・ドア チェーンを解錠。	 復旧 対処後、居室内の復旧ボタンを 押してスタッフ親機で復旧。

■スタッフルーム呼出

	呼び出す	呼び出し受ける	通話	終話
通常呼出	 メニュー 待受画面で「メニュー」 ボタンを押します。	 ビボパン ビボパン 「キョソツ」+ 居室番号表示 呼出音、居室番号がデジタル表示。	 受話器をとり、通話。	 もどす

■住戸呼出

	呼び出す	通話	終話
通常呼出	 受話器あげる テンキーで居室番号と呼出を押す。	 〇〇さん もしもし 相手がでたら通話。	 受話器もどす

■放送

	呼び出す	通話	終話
通常呼出	 受話器あげる 高齢者住戸一斉放送は *+0+9+呼出 個別放送は *+3+居室番号+ 呼出を押す。	 〇〇さん 放送。	 受話器もどす